

Einleitung

Das Pelvita+ ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa. Es wurde für die Behandlung von Blasenentleerungsstörungen bzw. Stuhl- und Harninkontinenz entwickelt. Das Elektrotherapiegerät wird für das kontrollierte Training der Beckenbodenmuskulatur und zum Sphinktertraining eingesetzt.

Drei zeitgesteuerte Therapiemethoden sind durchführbar:

- das EMG-Biofeedback-Training (Entspannen, Anspannen)
- die Elektrostimulation (Entspannen, Anspannen mit Stromgefühl)
- die Kombination aus EMG-Biofeedback-Training und Elektrostimulation (Entspannen, Anspannen ohne Stromgefühl, Entspannen, Anspannen mit Stromgefühl)

Wichtiger Hinweis

Diese Kurzanleitung ergänzt die Gebrauchsanweisung des Pelvita+. Bevor Sie das Therapiegerät verwenden, sind alle medizinischen und technischen Hinweise der Gebrauchsanweisung zu beachten. Das Pelvita+ darf nicht auf der alleinigen Grundlage dieser Zusatzinformationen angewendet oder betrieben werden.

Verbindung des Kabels mit dem Sensor

Verbinden Sie das Kabel mit dem Sensor bitte wie folgt:

KABEL	SENSOR
Schwarz	↔ Rot
Schwarz	↔ Schwarz
Rot	↔ Grün

Pelvita+

Kurzanleitung für Patienten

Zusatzinformationen zur Gebrauchsanweisung für das Inkontinenz-Therapiegerät



V 02-20

Diese Kurzanleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen, welche der Firma Haynl-Elektronik GmbH vorbehalten sind.

Änderungen und Verbesserungen können jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Alle Angaben werden regelmäßig überprüft. Korrekturen werden in der nächsten Ausgabe vorgenommen.





Vertrieb durch:

Medizintechnik
Dipl.-Ing. Heise Vertriebs GmbH
Berghofer Straße 201
44269 Dortmund
Telefon: +49 231 / 48 84 45
Fax: +49 231 / 48 22 98

e-mail: info@medizintechnik-heise.de
internet: www.medizintechnik-heise.de



Anschlussbuchsen und Bedienelemente:

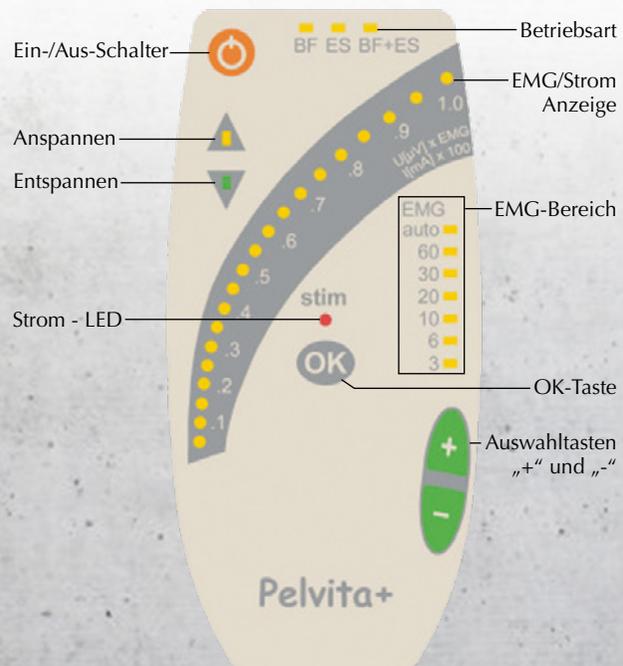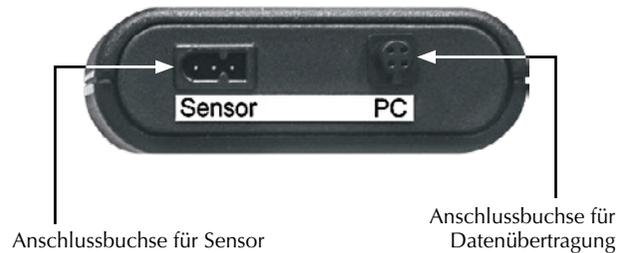

Bitte üben Sie entsprechend der markierten Anleitung!

Kurzanleitung BF

EMG-Biofeedbacktraining mit automatischer EMG-Einstellung

1. Anal-Sensor bzw. Vaginal-Sensor einführen und mit dem Gerät verbinden
2. Gerät einschalten
3. Wenn Betriebsart „BF“ blinkt, die „OK-Taste“ drücken.
4. Wenn grünes Lämpchen im Pfeil ▼ leuchtet, Muskeln entspannen
5. Wenn gelbes Lämpchen im Pfeil ▲ leuchtet, Muskeln anspannen
6. Nach der Behandlung schaltet sich das Gerät automatisch aus

Kurzanleitung ES

Elektrostimulation

1. Anal-Sensor bzw. Vaginal-Sensor einführen und mit dem Gerät verbinden
2. Gerät einschalten
3. Betriebsart ES mit + Taste einstellen
4. Wenn Betriebsart „ES“ blinkt, die „OK-Taste“ drücken.
5. Wenn gelbes „Stim-Lämpchen“ blinkt, die Stromstärke mit + oder - Taste einstellen
6. OK-Taste drücken
7. Nach der Behandlung schaltet sich das Gerät automatisch aus

Kurzanleitung BF+ES

Kombinationstraining mit automatischer EMG-Einstellung

1. Anal-Sensor bzw. Vaginal-Sensor einführen und mit dem Gerät verbinden
2. Gerät einschalten
3. Betriebsart BF+ES mit + Taste einstellen
4. Wenn Betriebsart „BF+ES“ blinkt, die „OK-Taste“ drücken.
5. Wenn gelbes „Stim-Lämpchen“ blinkt, dann Stimulationstromstärke mit + oder - Taste einstellen
6. OK-Taste drücken
7. Wenn grünes Lämpchen im Pfeil ▼ leuchtet, Muskeln entspannen
8. Wenn gelbes Lämpchen im Pfeil ▲ leuchtet, Muskeln anspannen
9. Danach erfolgt die Stimulation
10. Jetzt geht es mit Punkt 7 weiter
11. Nach der Behandlung schaltet sich das Gerät automatisch aus

Reinigen des Sensors

Den Sensor nach jedem Gebrauch unter fließendem, handwarmem Wasser reinigen. Bei starker Verschmutzung zusätzlich Seife oder Waschlotion verwenden. Sensor mit weichem Tuch abtrocknen und in einem unverschlossenem Kunststoffbeutel aufbewahren.

Stecker trocken halten!

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Die Kontaktelektroden könnten zerstört werden.