

Batterie

Ausführliche Informationen zur Batterie finden Sie auf Seite 8 der Bedienungsanleitung.

Austausch der Batterien

Wann? So lange die Stimulation wie gewöhnlich empfunden wird, kann die Behandlung fortgesetzt werden. Wenn die Stimulation allerdings nachlässt oder der Stimulator sich abschaltet, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Bei Verwendung von Akkus sind diese zu laden, wenn der Stimulator sich abschaltet.

ACHTUNG! Gewöhnliche Batterien dürfen nicht geladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.

Wie? Schalten Sie den Stimulator aus. Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach, indem Sie ihn zunächst nach unten schieben und dann abnehmen. Entfernen Sie nun die Batterien aus dem Batteriefach. Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterien auf die richtige Ausrichtung im Batteriefach (beachten Sie die Plus (+) und Minus (-) Markierungen).

ACHTUNG! Akkus / Batterien nicht wegwerfen, sondern vorschriftsmäßig entsorgen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Training!

1. Auflage, Dez. 2021

Diese Kurzanleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen, welche der Firma Haynl-Elektronik GmbH vorbehalten sind.

Änderungen und Verbesserungen können jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Alle Angaben werden regelmäßig überprüft. Korrekturen werden in der nächsten Ausgabe vorgenommen.



e-mail: info@medizintechnik-heise.de
internet: www.medizintechnik-heise.de

Cefar Peristim™

Kurzanleitung für Patienten

Zusatzinformationen zur Gebrauchsanweisung für das Heimbehandlungssystem bei Harn- und Stuhlinkontinenzkrankungen



Haben Sie Fragen zu
Bedienung oder Therapie?



SCAN ME

Vertrieb durch:

Medizintechnik
Dipl.-Ing. Heise Vertriebs GmbH
Berghofer Straße 201
44269 Dortmund
Telefon: +49 231 / 48 84 45
Fax: +49 231 / 48 22 98



Kurzanleitung

1. Bei Verwendung von Klebeelektroden, Haut mit milder Seifenlauge reinigen und gut abtrocknen
2. Vaginal- oder Rektalelektrode mit Heise-Elektrodengel eincremen
3. Elektrode einführen
 - Vaginalelektrode: Wie einen Tampon
 - Rektalelektrode: Bis zur runden Begrenzungsplatte
 - Klebeelektroden: Auf die Haut kleben (jeweils eine auf die Blase und eine auf das Steißbein und mit dem beiliegendem Kabel verbinden
 - Das beiliegende Anschlusskabel mit den Elektroden verbinden
4. Stecker in die **linke** Buchse an der Stirnseite des Gerätes stecken
5. Gerät einschalten durch Druck auf den **mittleren** Knopf unten im grünen Tastenfeld
6. Mit Programmwahlknopf das gewünschte Programm auswählen
7. Oben links im Sichtfenster erscheint das gewählte Programm:

P 2 Belastungs- 5 Sek. Stromfluss
(Stress-) Inkontinenz 10 Sek. Pause

P 4 Drang- Dauerstrom
(Urge-) Inkontinenz

P 6 Gemische Belastungs- 5 Sek. Stromfluss
Dranginkontinenz 10 Sek. Pause

Oben **rechts** im Sichtfenster erscheint die verbleibende Behandlungszeit.

Nun **erhöhen** Sie die Stromstärke durch Drücken der linken oberen Pfeiltaste im grünen Bedienfeld, bis Sie eine **nicht zu starke** Muskelkontraktion (Kribbeln) verspüren.

Beim gewählten Programm P 2 und P 6 geht die gewählte Stromstärke in der Pausenzeit auf „ - - “ zurück, und die mA-Anzeige blinkt.

In der Pausenzeit kann die Stromstärke **nicht erhöht werden**.

8. Mit dem Einstellen der für Sie richtigen Stromstärke **startet** das Therapieprogramm.
9. Bei Therapieende hören Sie drei akustische Signale.
10. Das Gerät stellt sich von selbst aus.
11. Ziehen Sie jetzt den Elektrodenstecker vom Gerät ab und entfernen Sie die Elektrode. Reinigen Sie die Elektrode mit einer milden Seife, und trocknen Sie diese mit einem fusselfreien Tuch ab.
12. Klebeelektroden wieder auf die Folie kleben. Diese sind wieder verwendbar.

Fehlermeldungen

Sie spüren keinen Strom ?

- Evtl. Batterie wechseln!
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Elektrode!
- Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in der Steckbuchse steckt!

Sie empfinden die Stimulation als schmerzhaft?

- Reduzieren Sie die Stromstärke!

Reinigen der Elektroden

Die Elektroden nach jedem Gebrauch unter fließendem, handwarmem Wasser reinigen. Bei starker Verschmutzung zusätzlich Seife oder Waschlotion verwenden. Elektroden mit weichem Tuch abtrocknen und in einem unverschlossenem Kunststoffbeutel aufbewahren.

Stecker trocken halten!

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Die Kontaktelektroden könnten zerstört werden.